



Drive Air

Dental hoses manufacturing

Cordone siliconato per strumenti dentali pneumatici

Istruzioni di montaggio



Ci congratuliamo per aver acquistato questo prodotto di qualità Drive Air.

Cordone fabbricato interamente in Italia.

DESCRIZIONE ED IMPIEGO PREVISTO

Cordoni siliconati per alimentazione di strumenti dentali pneumatici con attacchi conformi alla Norma ISO9168 : Tipo A (3 Vie), Tipo B (4 Vie), Tipo C (6 Vie).

| TAB.1 | Lunghezza Guaina cordoni STD | Lunghezza tubetti e fili elettrici cordoni STD | Peso | Peso vers. Acqua Regolabile |
|--------|------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| Tipo A | 160 cm | 180 cm | 135 gr | 155 gr |
| Tipo B | 160 cm | 180 cm | 135 gr | 155 gr |
| Tipo C | 160 cm | 180 cm | 148 gr | 170 gr |

Riferirsi alla Tab. 3 per i colori disponibili della guaina e per i codici di vendita.

RIFERIMENTI NORMATTIVI

I cordoni sono conformi alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CE. I cordoni sono conformi alla Direttiva Europea 2002/95/CE(RoHS).

CLASSIFICAZIONE

Classe I secondo sezione III, regola I dell'Allegato IX Direttiva 93/42/CE.

GENERALITA'

Prodotto destinato unicamente all'uso professionale.

Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato unicamente per l'impiego previsto. Il dispositivo deve essere utilizzato da persona competente nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore concernenti la sicurezza sul lavoro, delle misure igieniche e della prevenzione contro gli infortuni, nonché delle presenti istruzioni per l'uso.

DATI TECNICI

| | |
|---|----------------|
| Pressione massima aria alimentazione | 5 bar/ 72 psi |
| Portata del tubetto di alimentazione a 2,5 bar/36 psi | 40 NI/min |
| Pressione massima aria ed acqua spray | 4 bar / 58 psi |
| Portata del tubetto acqua spray a 2,0 bar / 29 psi | 250 ml/min |
| Portata del tubetto aria spray a 2,5 bar / 36 psi | 11NI/min |
| Resistenza massima alla trazione della cordicella di bloccaggio | 60N |

Riferirsi alle istruzioni degli strumenti dentali e/o raccordi rapidi per la corretta alimentazione degli stessi.

MONTAGGIO

Vedere la Fig.1 ed la Tab.2 prima di eseguire il collegamento dei tubetti e dei fili elettrici. Mantenere l'allineamento iniziale dei tubetti e dei fili elettrici. Tendere leggermente e fissare la cordicella di bloccaggio.



Il cordone deve essere connesso ad un sistema o unità di alimentazione conforme ai requisiti della norma IEC 601-1. Inoltre il sistema o unità di alimentazione deve avere un grado minimo di isolamento fra il circuito elettrico e la terra di 500 V e fra il circuito elettrico e la rete di 4000 V.



Il cordone con contatti elettrici non è omologato per la messa in servizio in presenza di miscele esplosive (gas anestetizzante).

| TAB. 2 | Funzionalità | Colore | Caratteristiche tecniche | | | |
|--------|-----------------------|-------------|--------------------------|---|---|---|
| 1 | Ingresso aria | Trasparente | Ø 2,70x4,00 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Aria Esausta | Rosso | Ø 3,30x4,60 mm | - | ✓ | ✓ |
| 3 | Acqua Spray | Verde | Ø 1,40x2,50 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Aria Spray | Blu | Ø 1,40x2,50 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Cordicella bloccaggio | Bianco | Cordino Poliestere | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Lampadina | Blu | 3,3 V / 1 A max | - | - | ✓ |
| 6 | Lampadina | Marrone | 3,3 V / 1 A max | - | - | ✓ |
| 7 | Guaina | xx | Ø 10 mm | ✓ | - | - |
| 7 | Guaina | xx | Ø 11 mm | - | ✓ | ✓ |

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire utilizzando un panno morbido impregnato con disinfettante a base di fenolo, glutaraldeide fino al 3%, alcool tipo etanolo o metanolo.

Non immergere il cordone in una soluzione disinfettante.

Per conservare lo stato della superficie della guaina in silicone del cordone si raccomanda di passare regolarmente un panno con un po' di talco.



Il cordone non è sterilizzabile.

La presenza di additivo antimicrobico nel tubetto dell' acqua spray non garantisce l'assenza di agenti contaminanti

RACCOMANDAZIONI

È indispensabile utilizzare aria compressa secca e pulita per garantire la durata del cordone. Mantenere la qualità dell'aria e dell'acqua fornita mediante regolari servizi di manutenzione del compressore e del sistema di filtraggio. L'uso di acqua calcarea e non filtrata intasa prematuramente il condotto spray.

SMALTIMENTO

Provvedendo a smaltire il cordone in modo appropriato si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

GARANZIA

Drive Air offre una garanzia che copre tutti i vizi di funzionamento, difetti di materiale o di fabbricazione. La durata della garanzia del cordone è 12 mesi a partire dalla data di fatturazione.

In caso di reclami giustificati, Drive Air procede alla riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto.

Si esclude il riconoscimento di qualsiasi altro reclamo, di qualsiasi origine esso sia, in particolare le richieste di risarcimento di danni.


Sono esclusi dalla garanzia danni o malfunzionamenti del prodotto causati da:

- usura eccessiva
- uso non corretto
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, per il montaggio e per la manutenzione
- errati collegamenti

La garanzia decade quando i danni e le loro conseguenze sono attribuibili ad interventi inadatti o a modifiche del cordone.

I diritti derivanti dalle prestazioni di garanzia possono essere rivendicati solo dietro presentazione del prodotto insieme alla copia della fattura o della bolla di consegna. Su questi documenti devono figurare chiaramente la data ed il codice di acquisto del cordone ed il numero di Lotto

FIG.1

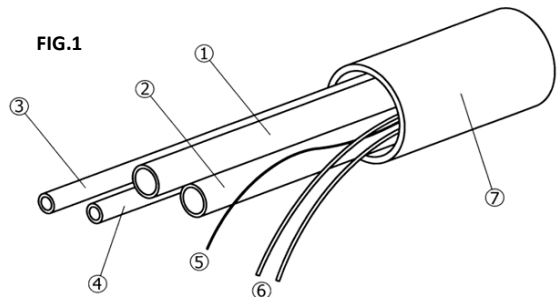

| TAB. 3 Varianti disponibili (ref.) | | | Legenda colori guaina | |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 3-vie tipo A | 4-vie tipo B | 6-vie tipo C | XX = WH | Bianco |
| 3H.STD.XX.1 | 4H.STD.XX.1 | 6H.STD.XX.1 | XX = LG | Grigio RAL9002 |
| 3R.STD.XX.1 | 4H.STD.XX.2 | 6H.STD.XX.2 | XX = MG | Grigio RAL7035 |
| | 4H.STD.XX.3 | 6H.STD.XX.3 | XX = GR | Grigio RAL7038 |
| | 4H.STD.XX.4 | 6H.STD.XX.4 | XX = BR | Surf Adec |
| | 4H.STD.XX.5 | 6H.STD.XX.5 | XX = BL | Nero |
| | 4R.STD.XX.1 | 6R.STD.XX.1 | | |